

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/aspirator-do-nosa-akuku-a0036-gruszka-do-nosa-dla-dzieci-na-katarek-p-46395.html>



Aspirator do nosa Akuku A0036 gruszka do nosa dla dzieci na katarek

Cena	17,30 zł
Cena poprzednia	17,60 zł
Kod EAN	5907644000364
Producent	akuku

Opis produktu

Aspirator manualny do usuwania wydzieliny z nosa niemowlaka.

Przeznaczenie

Aspirator przeznaczony jest do usuwania wydzieliny z nosa dziecka, w celu ułatwienia oddychania i zapobiegania zatkanie nosa. Mechanizm działania aspiratora polega na tym, że rodzic siłą swoich własnych płuc odciąga zalegającą wydzielinę. Aspirator składa się z końcówki, którą wkłada się do noska malucha, wężyka, zbiornika oraz ustnika, który rodzic trzyma w swoich ustach. Taki aspirator jest bardzo wygodny w podróży lub na spacerze ze względu na to, że jest mały i można go wszędzie użyć, np. w samochodzie, czy będąc z dzieckiem na spacerze. Poza tym aspirator ręczny nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, dlatego dziecko się go nie boi. Końcówka jest tak skonstruowana, że nie ma możliwości zbyt głębokiego jej włożenia i uszkodzenia śluzówki.

Elementy aspiratora

Aspirator składa się z czterech elementów:

1. Silikonowa końcówka – 2 szt.
2. Zbiornik na wydzielinę
3. Silikonowa rurka łączy zbiornik z plastikową końcówką.
4. Płaska plastikowa końcówka służy do zasysania

Sposób użycia:

Dziecko należy ułożyć w pozycji półsiedzącej, opierając jego plecy i główkę na przedramieniu lub w pozycji siedzącej.

1. Złożyć wszystkie elementy aspiratora zgodnie z zamieszczonym rysunkiem
2. Plastikową końcówkę aspiratora włożyć do ust
3. Silikonową końcówkę przyłożyć do otworu nosowego dziecka
4. Odciąganie wydzieliny powinno trwać nie więcej niż 5 sekund
5. Czynność odciągania wydzieliny powtarzać do momentu, aż do zbiorniczka przestanie spływać wydzielina
6. Rozebrać aspirator na części i dokładnie umyć. Aspirator powinno się sterylizować przed i po każdym użyciu we wrzącej wodzie lub roztworze sterylizującym.

Ostrzeżenie!

Zaleca się wyjątkową ostrożność podczas używania aspiratora w przypadku występowania ran w nosie lub hemofilii. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka samego podczas używania aspiratora. Nie wkładać do mikrofalówki. Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ulotkę należy zachować w celach informacyjnych lub na wypadek reklamacji.