

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/avent-philips-oslonki-piersi-scf15303-silikonowe-nakladki-do-karmienia-rozmiar-m-oslonka-brodawki-sutkowej-p-36530.html>



Avent Philips osłonki piersi SCF153/03 silikonowe nakładki do karmienia rozmiar M osłonka brodawki sutkowej

Cena	42,80 zł
Numer katalogowy	SCF 153/03
Kod EAN	8710103907732
Producent	Avent Philips

Opis produktu

Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*

- Łatwe do przyssania się i delikatne dla skóry*
- Kształt zapewniający kontakt ze skórą
- Ochrona podrażnionych brodawek
- Rozmiar średni (21 mm)
- 2 sztuki w zestawie

Osłony brodawek są zaprojektowane tak, aby pomóc Ci karmić piersią, gdy masz problemy z brodawkami lub gdy Twoje dziecko ma kłopot z przyssaniem się. Wyjątkowo cienka osłona brodawki w kształcie motyla umożliwia dziecku kontakt z piersią i nie przeszkadza w nawiązywaniu więzi z dzieckiem podczas karmienia.

Kształt osłonki zapewnia bezpośredni kontakt z dzieckiem

Nasze ultracienkie osłonki brodawek sutkowych w kształcie skrzydła motyla zostały zaprojektowane z myślą o bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Dzięki wyjątkowemu kształtowi osłonek piersi dotyka zarówno nos, jak i podbródek dziecka. Dzięki temu niemowlę może poczuć zapach mamy i dotknąć jej skóry. Wystarczy umieścić osłonkę na środku brodawki, aby dziecko mogło prawidłowo przyssać się do całego sutka. Dzięki temu stworzysz więź z dzieckiem, jednocześnie chroniąc swoje brodawki.

Zaprojektowana, by pomóc rozwiązać problemy z przysysaniem

Nasze osłonki brodawek pomagają rozwiązać problemy z przysysaniem się dziecka do piersi i wydłużyć karmienie*. Nakładki w kształcie sutka ułatwiają ssanie w przypadku płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych. Pomagają też dzieciom, które nie wykształciły jeszcze techniki ssania lub urodziły się ze zniekształconą jamą ustną. Osłonka wyciąga brodawkę i utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji w czasie przerw w karmieniu.

Dla delikatnych, podrażnionych lub bolesnych brodawek sutkowych

Osłonki brodawek sutkowych zapewniają komfort w czasie karmienia i przynoszą ulgę w przypadku podrażnionych, popękanych lub bolesnych brodawek sutkowych. Pomagają zmniejszyć ryzyko ocierania i rozciągania brodawek sutkowych, dzięki czemu możesz wygodnie karmić dziecko piersią.

Niemowlęta mogą pić we własnym tempie

Jeśli mama chce kontrolować wypływ mleka lub dziecko nie ma siły ssać, osłonki brodawek sutkowych mogą im pomóc. Trzy otwory w osłonce pozwalają zmniejszyć siłę wypływu pokarmu. Dzięki temu dziecko może pić we własnym tempie nawet w przypadku nadmiernej podaży mleka.

Zaprojektowane z myślą o naturalnym dopasowaniu

Ostonki brodawek sutkowych są dostępne w dwóch rozmiarach. Małe ostonki pasują do brodawek o średnicy od 12 mm, a średnie — do 21 mm. Aby znaleźć swój rozmiar, usiądź wygodnie i załóż jedną z ostonek na brodawkę. Obróć ostonkę w prawo i wprowadź sutek do tunelu. Następnie rozciągnij podstawę ostonki wokół otoczki brodawki. Jeśli pomiędzy brodawką a silikonem została 2-milimetrowa przerwa, ostonka jest odpowiednio dopasowana. Wskazówka: rozmiar dotyczy brodawki sutkowej, a nie otoczki. Nie wiesz, który rozmiar wybrać? Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc.

Łatwe czyszczenie w higienicznym etui

Należy wyczyścić ostonki brodawki sutkowej przed każdym użyciem. Zajmuje to mniej niż 10 minut. Umieść ostonki we wrzącej wodzie na pięć minut lub użyj specjalnego etui. Włóż do niego dobrze wypłukane ostonki i wlej 25 ml wody. Następnie umieść etui w kuchence mikrofalowej i włącz moc 750–1000 W na 3 minuty. Odczekaj pięć minut, aż ostygną. Wylej wodę. Ostonki są gotowe do użycia. Z tego wygodnego etui do czyszczenia ostonek warto korzystać w trakcie podróży. Oczywiście służy ono także do ich przechowywania.

Łączenie karmienia piersią i butelką

Ostonka brodawki sutkowej Philips Avent jest wykonana z bardzo cienkiego i miękkiego silikonowego materiału, który jest bardziej zbliżony do materiału, z którego wykonywane są produkty do karmienia niemowląt. Ułatwia przejście z karmienia piersią na karmienie butelką podczas łączenia obu metod.