

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/kompres-zelowy-na-2-piersi-akuku-a0534-p-45591.html>



Kompres żelowy na 2 piersi Akuku A0534

Cena	42,99 zł
Cena poprzednia	44,30 zł
Numer katalogowy	Kompresy żelowe
Kod EAN	5907644005376
Producent	akuku

Opis produktu

Kompresy żelowe akuku® to produkt stworzony w trosce o dobro kobiety w okresie karmienia piersią. Wykonane z nietoksycznego materiału, nie zawierają lateksu, ołowiu i bisfenolu. Okłady można stosować na zimno lub na ciepło, w zależności od potrzeb.

Stosowanie na ciepło:

Pomagają udrożnić zatkane kanały mlekowe i przynoszą ulgę w przypadku zapalenia sutka, a także obrzmiałych, przepełnionych piersi. Należy je stosować bezpośrednio przed karmieniem w celu ułatwienia wypływu mleka. Można ich również używać przed lub w trakcie odciągania mleka, aby skrócić czas odciągania pokarmu, dzięki pobudzeniu szybszego wypływu mleka.

Sposób przygotowania: umieścić kompres w pokrowcu na talerzu kuchenki. Ustawić czas w zależności od mocy kuchenki mikrofalowej (700 W - 16 sekund/1 000 W - 13 sekund/ 1 250 W - 11 sekund). Każdy kompres należy podgrzać oddzielnie. Po skontrolowaniu stopnia ogrzania kompresu w razie potrzeby można podgrzać kompres przez dodatkowe 5 sekund.

Stosowanie na zimno:

Przynoszą ulgę piersiom obolałym i obrzmiałym na skutek przepełnienia lub zapalenia sutka. Aby zapobiec przesuwaniu się okładów, można umieścić je w biustonoszu.

Sposób przygotowania: okłady należy umieścić w zamrażalniku na przynajmniej 2 godziny. Przed przyłożeniem do piersi, okłady należy włożyć do pokrowców.

Ostrzeżenie!

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego – nie stosować do celów innych niż wyżej wymienione.

Stosować maksymalnie przez 20 minut.

Myć łagodnym mydłem, detergentem.

Na kompresy nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.

Nie stosować u dzieci.

Okładów żelowych akuku® nie należy podgrzewać dłużej niż zaleca producent. Podgrzewanie niezgodnie z instrukcją może spowodować ich uszkodzenie. Przed zastosowaniem zawsze należy sprawdzić temperaturę kompresów. Nadmierne podgrzanie lub zbyt długie przykładanie może prowadzić do uszkodzenia ciała. Nie należy stosować na wrażliwą skórę lub otwarte rany. Stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie przekływać i/lub nie połykać zawartości okładów. Z okładami nie należy zasypiać. W przypadku silnego, utrzymującego się przewlekłego bólu, należy skontaktować się z lekarzem.