

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/laktator-elektryczny-medela-easy-na-jedna-piers-przenosny-pojedynczy-z-wbudowanym-akumulatorem-p-60178.html>



Laktator elektryczny Medela EASY na jedną pierś - przenośny pojedynczy z wbudowanym akumulatorem

Cena	309,99 zł
Cena poprzednia	345,38 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	7610472881118
Producent	Medela

Opis produktu

Medela Easy przenośny pojedynczy laktator elektryczny

Przenośna i kompaktowa konstrukcja elektrycznego laktatora Medela Easy Single umożliwia mamom wygodne i efektywne odciąganie mleka w dowolnym momencie.

Dzięki trzem trybom odciągania oraz dodatkowej funkcji masażu laktacyjnego, braku rurek, wbudowanemu akumulatorowi oraz lejkom PersonalFit Flex™, urządzenie jest łatwe w montażu i obsłudze, zapewniając skuteczne i komfortowe odciąganie mleka. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, w domu czy wróciłaś do pracy – Medela Easy to idealny towarzysz, który pozwala odciągać mleko zawsze i wszędzie.

Skuteczny i komfortowy

Medela Easy zapewnia bardziej efektywne i wygodne odciąganie pokarmu dzięki technologii PersonalFit Flex™, która obejmuje lejki do piersi o kącie 105° oraz elastyczną, miękką krawędź, co pozwala uzyskać do 11,8% więcej mleka. Urządzenie oferuje trzy tryby odciągania oraz regulowaną siłę ssania, a także dodatkowy tryb masażu laktacyjnego, który można stosować samodzielnie lub w trakcie sesji odciągania.

Przenośny i z wbudowanym akumulatorem

Medela Easy jest lekki – waży zaledwie 276 g – i wyposażony w port USB oraz kabel, co ułatwia korzystanie i ładowanie w dowolnym miejscu. Wbudowany akumulator zapewnia do 3 godzin pracy, umożliwiając odciąganie pokarmu w podróży bez potrzeby podłączania do gniazdka, co zwiększa mobilność.

Łatwy w obsłudze i czyszczeniu

Medela Easy nie posiada rurek, jest łatwy do złożenia i użytkowania dzięki prostemu, podświetlanemu interfejsowi z zaledwie trzema przyciskami. Laktator można wygodnie trzymać i obsługiwać jedną ręką.

3 tryby odciągania

Medela Easy oferuje tryb stymulacji, tryb odciągania oraz tryb mieszany, który łączy oba te tryby, dodając cykle stymulacji pomiędzy cyklami stymulacji lub odciągania. Zapewnia to większy komfort i może wspierać lepszy wypływ mleka.

Podświetlany interfejs z 3 przyciskami

Wyświetlacz silnika posiada trzy przyciski – zmniejszanie siły ssania, zwiększanie siły ssania oraz przycisk włączania/wyłączania i zmiany trybu. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w podświetlane wskaźniki, które aktywują się po jego uruchomieniu.

Lejek PersonalFit Flex™

Dzięki kątowi nachylenia 105°, miękkiej krawędzi i owalnemu kształtowi, lejek PersonalFit Flex™ lepiej dopasowuje się do piersi i wywiera mniejszy nacisk na przewody mleczone niż tradycyjne lejki. Rezultat? Bardziej komfortowe i skuteczne odciąganie pokarmu. Większy komfort dla Ciebie, do 11,8% więcej mleka dla Twojego dziecka.

Owalny kształt dla lepszego dopasowania

Lejek PersonalFit Flex™ ma owalny kształt i może być obracany o 360 stopni, co pozwala znaleźć najlepsze dopasowanie i poziom komfortu.

Idealny w podróży

Laktator wyposażony jest w port USB i kabel, co umożliwia łatwe ładowanie w dowolnym miejscu. Wbudowany akumulator działa do 3 godzin, pozwalając na odciąganie pokarmu w ruchu bez konieczności podłączania do gniazdka, co zwiększa mobilność.

Wytrzymała butelka, bez BPA

Szerokootworowa butelka PPSU (polifenylosulfon) jest trwała, odporna na wysoką temperaturę i nie pochłania zapachów. Produkty wykonane z PPSU nie zawierają BPA.

Tryb masażu

Ten tryb może być używany samodzielnie jako masażer laktacyjny, aby złagodzić obrzmienie piersi, zapalenie sutka, zatknięte kanaliki mleczne oraz poprawić przepływ mleka. Może być również aktywowany podczas sesji odciągania pokarmu.

Bezpieczne do mycia w zmywarce i używania w mikrofalówce

Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem matki są przystosowane do mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej. Można je również dezynfekować za pomocą torebek Medela Quick Clean do mikrofalówki.

Zawartość opakowania

- 1 x PPSU butelka 150 ml
- 1 x jednostka zasilająca
- 1 x lejek 24 mm
- 1 x nakrętka do butelki
- 1 x membrana
- 1 x zaworek
- 1 x podstawa zaworka
- 1 x kabel USB typ-c
- Instrukcja obsługi

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

Zawsze przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że laktator jest przeznaczony do indywidualnego użytku – stosowanie wspólnych urządzeń może prowadzić do ryzyka infekcji. Przed każdym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

2. Zagrożenia mechaniczne

Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym rurki, uszczelki i nasadki – uszkodzone elementy mogą powodować urazy lub nieprawidłowe działanie. Nie używaj laktatora z widocznymi pęknięciami lub innymi uszkodzeniami. Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu lub użytkowania urządzenia, aby zapobiec złamaniom lub skałeczeniom.

3. Zagrożenia elektryczne

W przypadku elektrycznych laktatorów zawsze używaj oryginalnego zasilacza i przewodu. Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, np. w pobliżu wody, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem. Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem konserwacji.

4. Zagrożenia termiczne

Nie podgrzewaj elementów laktatora w kuchence mikrofalowej – może to prowadzić do deformacji materiałów i ryzyka poparzenia. Przed użyciem sprawdzaj temperaturę części mających kontakt ze skórą, szczególnie po ich sterylizacji.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

Nie używaj laktatora w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku transportu upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

6. Konserwacja i higiena

Regularnie myj wszystkie części urządzenia w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym lub sterylizuj je zgodnie z instrukcją producenta. Po każdym użyciu wylewaj mleko pozostałe w rurkach lub pojemniku, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

Osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością ruchową powinny stosować urządzenie pod nadzorem lub z pomocą, jeśli to konieczne. W przypadku dyskomfortu, bólu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania natychmiast zaprzestań korzystania z laktatora i skonsultuj się z lekarzem lub doradcą laktacyjnym.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności. Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).