

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/lansinoh-oslonki-laktacyjne-2-sztuki-oslonki-piersi-rozmiar-1-small-20-mm-nakladki-do-karmienia-2-sztuki-nakladek-p-57486.html>



Lansinoh osłonki laktacyjne 2 sztuki osłonek piersi rozmiar 1 Small 20 mm nakładki do karmienia 2 sztuki nakładek

Cena	35,88 zł
Cena poprzednia	46,00 zł
Kod EAN	5060420230765
Producent	Lansinoh

Opis produktu

Pomagają pokonać trudności powstałe podczas karmienia piersią wywołane przejściowymi dolegliwościami bólowymi brodawek sutkowych.

Umożliwiają kontynuację karmienia piersią mimo wystąpienia przejściowych trudności wywołanych:


- problemami ze ssaniem piersi przez dziecko z powodu wcześniactwa, choroby lub wady anatomicznej jamy ustnej,
- wystąpieniem płaskich lub wklęsłych brodawek piersi,
- podrażnieniem lub obrzękiem brodawek piersi,
- nadmiernym wpływem pokarmu.

Zestaw zawiera: komplet osłonek (2 sztuki) oraz praktyczne etui

EAN:5060420230765

"To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą"

Lansinoh.

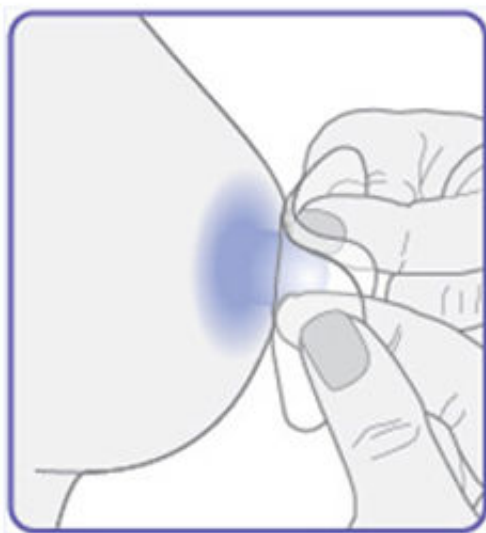





OSTRZEŻENIE

Ostonki laktacyjne nie powinny być stosowane w pierwszym tygodniu po urodzeniu dziecka, chyba że jest to zalecane przez specjalistę do spraw laktacji, gdyż ich stosowanie może wpływać na laktację.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed zastosowaniem osłonek laktacyjnych należy skonsultować się ze specjalistą do spraw karmienia piersią, aby w prawidłowy sposób rozwiązać pierwotną przyczynę problemu.

Kontrola specjalistyczna jest konieczna, aby mieć pewność, że dziecko otrzymuje wystarczającą ilość pokarmu, i w prawidłowy sposób przybiera na wadze, a matce udzielono wszelkich niezbędnych porad, których potrzebuje.

Ostonki laktacyjne należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, postępując zgodnie z instrukcją użytkowania sprawdzić przed każdym zastosowaniem.

Przerwać zastosowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu. Nigdy nie pozostawiać opakowania oraz jego elementów bez nadzoru.

Jeśli wystąpią problemy lub pojawi się ból, należy skonsultować się ze specjalistą do spraw karmienia piersią.

W czasie gdy osłonki nie są używane, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie osłonek laktacyjnych może ułatwić przystawienie dziecka do piersi do momentu otrzymania porady specjalisty medycznego,

który będzie leczył nieprawidłowości związane z wędzidełkiem języka, a w przypadku gdy dziecko jest wcześniakiem lub jest chore i było karmione z butelki, osłonka laktacyjna może ułatwić prawidłowe przystawienie dziecka do piersi.

Pliki do pobrania:

- [instrukcja obsługi osłonki laktacyjnej](#)
- [Podmiot Odpowiedzialny](#)
- [osłonki laktacyjne 20mm siatka produktu](#)
- [naklejka osłonki laktacyjnej](#)