

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/lejek-do-laktatora-neno-rozmiar-medium-24-mm-p-47614.html>



Lejek do laktatora Neno rozmiar Medium 24 mm

Cena	23,99 zł
Cena poprzednia	24,99 zł
Producent	Neno

Opis produktu

Lejek do laktatora w różnych rozmiarach

Lejek do laktatora Neno to produkt całkowicie bezpieczny, nie zawierający BPA oraz odpowiedni dla każdej mamy, bez względu na rodzaj porodu. W ofercie Neno znajdują się 3 rozmiary lejka – Slim (21mm), Medium (24mm) oraz Large (27mm). O tym jak odpowiednio dobrać rozmiar lejka do rozmiaru brodawki, przeczytasz poniżej – w opisie produktu.

CZYM JEST LEJEK LAKTATORA?

Lejek laktatora znany jest też jako nakładka na pierś. To lejkokształtny element z delikatnego silikonu japońskiego, który przykładasz do **piersi**, aby ustabilizować **laktator** i umożliwić **odciągnięcie mleka z piersi do butelek**. Wytwarzane przez **laktator** podciśnienie zasysa Twoją brodawkę sutkową i stymuluje ją tak, jak robi to niemowlę podczas karmienia. Zły dobór lejka może powodować nie tylko dyskomfort lub niedokładne odciągnięcie mleka, ale nawet zatrzymanie laktacji! Dlatego odpowiedni dobór rozmiaru lejka jest tak ważny.

KAŻDA PIERŚ JEST INNA. LEJEK MUSI PASOWAĆ.

Tak jak ciuchy kupujemy w różnych rozmiarach, tak samo powinno być z **lejkami do laktatora**. Każda **pierś** jest inna, a co za tym idzie każda brodawka jest inna. Dziecko potrafi ułożeniem swoich ust i przyciskaniem brodawki do podniebienia odpowiednio zastymulować wypływ mleka, **lejek laktatora** nie. Musi być zatem tak dobrany, aby przy podciśnieniu wytworzonym przez **laktator** nie obcierać brodawki, nie zaciągać wraz z nią fragmentu otoczki, ani nie powodować dyskomfortu podczas odciągania mleka.

JAK MIERZYĆ BRODAWKĘ?

Najlepiej jest mierzyć brodawkę po 32 tygodniu ciąży. Po tym okresie pierś, a właściwie brodawka nie ulega już tak dynamicznym zmianom jak we wcześniejszych etapach ciąży. Po 32 tygodniu ciąży z dużym prawdopodobieństwem można już stwierdzić, jaki rozmiar przyjmie brodawka po porodzie. Jak zmierzyć brodawkę sutkową? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, co właściwie należy zmierzyć. Brodawka to jest część wystająca sutka. Dookoła niej znajduje się otoczka brodawki. Mierzmy TYLKO średnicę samej brodawki – możesz zmierzyć ją linijką, metrem krawieckim lub suwmiarką. Aby ułatwić Ci zadanie stworzyliśmy [szablon](#), w którym możesz wyciąć otwory i dowiedzieć się, jaki rozmiar lejka pasuje do Twoich piersi. Sprawdź jaka średnica lejka będzie dobra dla Ciebie.

JAK DOBRAĆ ROZMIAR LEJKA?

Każda **pierś** jest inna, dlatego wybierz odpowiedni dla siebie rozmiar **lejka Neno**. Właściwie dobrany **lejek** jest bardzo ważny dla dobrego przepływu mleka oraz komfortu **Mamy** podczas odciągania. **Neno** w swojej ofercie ma 3 rozmiary lejków: – lejek SLIM 21 – średnica brodawki 17/18 mm – lejek 24 – średnica brodawki 19/20/21 mm – lejek LARGE 27 – średnica brodawki 22/23/24 mm **Lejki Neno** zapobiegają urazom i otarciom brodawek, pasują do wszystkich modeli **laktatorów Neno**, są BPA free – bezpieczne dla zdrowia **Mamy i dziecka**. Najczęściej wybieranym **lejkami** jest ten o rozmiarze 24, czyli pasujący do

brodawek 19/20/21 mm.

CZY WIESZ, ŻE:

- rozmiar piersi, a tym samym **lejka** może zmieniać się w ciągu jednego cyklu karmienia piersią - rozmiar sutka zmienia się, gdy włączysz **laktator** i wytworzy się w nim podciśnienie - zbyt mocne dociskanie **laktatora** może zablokować kanaliki mleczne - niedopasowany rozmiar **lejka** może podrażniać sutki, a dyskomfort może doprowadzić do zaniku laktacji. **Laktatory Neno** aby zapewnić bezpieczeństwo piersi **Neno Mam**, ma wymienne lejki. Jeśli Twoje brodawki są na granicy rozmiarów, możesz zaopatrzyć się w dwa **rozmiary lejków**. W odróżnieniu od **laktatorów** z niewymiennymi lejkami, możesz zapewnić sobie spokojną głowę i rezerwę lejkową, w razie gdyby Twoje brodawki zmieniły rozmiar podczas karmienia.

KIEDY NALEŻY WYBRAĆ INNY ROZMIAR LEJKA:

- brodawka ociera się o ścianki tunelu podczas pracy **laktatora** - brodawka ma wokół siebie dużo wolnej przestrzeni - do tunelu **lejka** wciągana jest część otoczku sutkowej - po cyklu odciągania masz uczucie, że mleko nie zostało odciągnięte do końca