

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/medela-sns-new-system-wspomagajacy-karmienie-piersia-p-51688.html>



Medela SNS New System Wspomagający Karmienie Piersią

Cena	219,99 zł
Cena poprzednia	249,00 zł
Producent	Medela

Opis produktu

Medela Brusternährungsset Sns zestaw (Opakowanie: 1 szt.) to zestaw przeznaczony dla osób, które chcą karmić piersią, ale z różnych przyczyn nie są w stanie tego robić bezpośrednio. Urządzenie umożliwia budowanie więzi między rodzicem a niemowlęciem poprzez przystawianie do piersi nawet w przypadku konieczności karmienia mlekiem zastępczym.

EFEKT DZIAŁANIA

Medela Brusternährungsset Sns zestaw (Opakowanie: 1 szt.) to specjalne urządzenie, które zakładane jest na pierś u osób, które chcą karmić piersią w sposób naturalny, ale z różnych przyczyn nie mogą tego robić. Sprawdza się przy zaburzeniach laktacji, u rodziców adopcyjnych czy niebinarnych. Pozwala budować prawidłowe więzi między rodzicem a niemowlęciem i doświadczać radości karmienia piersią nawet, kiedy jest to niemożliwe w sposób naturalny.

Medela Brusternährungsset Sns zestaw (Opakowanie: 1 szt.) ma też pozytywny wpływ na karmione dziecko. Stymuluje odruch ssania i umożliwia naturalną suplementację mlekiem modyfikowanym. Kontakt „skóra do skóry” działa na niemowlę uspokajająco i relaksująco. Wpływa też na właściwy rozwój jamy ustnej i aparatu mowy.

SKŁAD

silikon, ABS

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt należy wyrzucić w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń lub wad.

Stosować tylko oryginalne części zamienne.

Ze względów higienicznych, produkt powinien być stosowany tylko przez jedną osobę i jedno dziecko.

Nie należy przypinać produktu do wstążek i sznurków czy luźnych części ubrania. Grozi to uduszeniem dziecka.

Nie należy zmuszać dziecka do karmienia przez zestaw. Jeśli niemowlę nie jest temu chętne, należy spróbować ponownie przy następnym karmieniu.

Produkt można sterylizować wrzącą wodą lub w komorze zmywarki do naczyń. Można też użyć torebek do sterylizacji QuickClean (z wyłączeniem drenu, zacisku, nakrętki, klipsa i przyrządu czyszczącego). Do regularnego czyszczenia należy użyć ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy umyć ręce i wysterylizować elementy zestawu.

Pojemnik napełnić mlekiem matki lub modyfikowanym. Złożyć zestaw zgodnie z rysunkiem znajdującym się w ulotce: przymocować klips do nakrętki, a następnie umieścić całość wokół podstawy pojemnika. Skręcić zawór z nakrętką i przykręcić go do pojemnika. Przełożyć dren przez zacisk i wcisnąć go w zacisk, by zabezpieczyć mleko przed wylaniem. Zaciśnąć na nakrętce.

Pojemnik przypiąć stabilnie do biustonosza lub ramiączka bluzki. Przystawić dziecko do piersi i delikatnie włożyć dren w górny kącik ust niemowlęcia. Zwolnić zacisk.

Po karmieniu należy wyczyścić wszystkie elementy zestawu.

DODATKOWE INFORMACJE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

W opakowaniu znajdują się: 1x pokrywka TwistLock, 1x pojemnik z pokrywką 150 ml, 1x zacisk, 1x rurka TwistLock, 1x klips, 1x pierścień, 1x środek czyszczący, 1x instrukcja obsługi.

Produkt ten kupisz w tej samej cenie bez kosztów dostawy w naszych sklepach w Warszawie na ul. Grochowskiej 178 i 180 róg ul. Garwolińskiej.