

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/medela-solo-hands-free-laktator-elektryczny-muszlowy-na-jedna-piers-p-52828.html>



Medela SOLO Hands Free laktator elektryczny muszlowy na jedną pierś

Cena	599,99 zł
Cena poprzednia	679,57 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Medela

Opis produktu

Pojedynczy laktator elektryczny Solo™ Hands-free

Łatwy w obsłudze. Efektywny. Nie wymagający używania rąk.

Pojedynczy laktator elektryczny Medela Solo™ Hands-free: idealne rozwiązanie przeznaczone do okazjonalnego odciągania pokarmu bez użycia rąk. Prezentujemy nasz elegancki, kompaktowy i intuicyjny laktator Solo™ w połączeniu z muszlą zbierającą Medela Hands-free Collection Cup — ta anatomiczna konstrukcja wspomaga skuteczne odciąganie pokarmu; dodatkowo urządzenie jest ultralekkie* zapewniając wygodę użytkowania oraz jest łatwe w czyszczeniu, ponieważ składa się z zaledwie trzech części.

*Tylko 76 g na muszlę

Solo™ Hands-free — funkcje i zalety

Kompaktowy i lekki: dzięki lekkiej, kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu akumulatorowi, laktator Solo™ można łatwo zmieścić w kieszeni lub nosić przy sobie. W połączeniu z przenośną muszlą zbierającą, zapewnia on mobilność, wtedy gdy najbardziej jej potrzebujesz.

Solo™ Hands-free dostarczany jest wraz z wyjątkową muszlą zbierającą firmy Medela, która:

- **Posiada anatomiczną konstrukcję:** dopasowuje się do kształtu piersi, zapewniając skuteczne odciąganie pokarmu i maksymalny komfort.
- **Ultralekki:** zaledwie 76 g sprawia, że jest to jeden z najlżejszych modeli dostępnych na rynku, zaprojektowany tak, aby wygodnie i dyskretnie mieścić się w biustonoszu.
- **3-częściowy, łatwy w czyszczeniu:** łatwy montaż i możliwość mycia w zmywarce, co sprawia, że odciąganie pokarmu jest mniej czasochłonne.
- **Przezroczysta konstrukcja:** Ułatwia sprawdzanie, czy brodawka sutkowa jest prawidłowo umieszczona w tunelu, zapobiegając otarciom oraz wspomagając skuteczne odciąganie mleka. Przezroczysta muszla pomaga dostrzec, kiedy i w jaki sposób płynie mleko, a także zmierzyć jego objętość wraz z końcem odciągania.

Łączność: Korzystaj z automatycznego śledzenia, łącząc się z aplikacją Medela Family™ — osobistym asystentem, który zapewni Ci automatyczne śledzenie w czasie rzeczywistym, spersonalizowane, oparte na badaniach naukowych treści, a także inteligentne narzędzia i wskazówki dotyczące odciągania pokarmu.

Intuicyjna obsługa: Dzięki zaledwie 4 przyciskom laktator Solo™ Hands-free jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Dziesiątki lat doświadczeń w dziedzinie karmienia piersią i laktacji sprawiły, że firmie Medela udało się połączyć pojedynczy laktator elektryczny Solo™ z muszlami do zbierania pokarmu Hands-free Collection Cup, zaprojektowanymi zgodnie z anatomią kobiet w taki sposób, **aby muszle wygodnie dopasowywały się do każdej unikalnej piersi.**

Lekki i wygodny, ponieważ posiada tylko **trzy części wymagające czyszczenia, dzięki czemu odciąganie pokarmu i wykonywanie wielu czynności na raz stało się jeszcze łatwiejsze.**

Zawartość opakowania:

1 × pojedynczy elektryczny przenośny laktator Solo™ firmy Medela
1 × Hands-free Collection Cup
1 × lejek 24 mm
1 × membrana
1 × rurka
1 × instrukcja obsługi

Wymiary:

Wymiary opakowania: 138,5 × 158,5 × 200,5 (wielkość urządzenia/opakowanie)

Waga modułu:

- Muszla 76 g
- Rurka 16,7 g
- Laktator 250 g

Gwarancja:

Gwarancja globalna <https://www.medela.com/breastfeeding/products/ewarranty>

Jak działa laktator Solo™ Hands-free?

Solo™ Hands-free, to pojedynczy laktator elektryczny, który zapewnia intuicyjne odciąganie pokarmu na najwyższym poziomie. Ten niewielki, lecz wydajny laktator posiada 9-stopniową regulację poziomów podciśnienia, zapewniając komfortowe odciąganie pokarmu. Technologia 2-Phase Expression™ firmy Medela imituje naturalny rytm ssania dziecka — najpierw działa szybciej, aby stymulować przepływ mleka, później wolniej, aby odciągać mleko, zapewniając tym samym skuteczne i wygodne pompowanie.

Podciśnienie doprowadzane jest do piersi za pomocą rurki połączonej z laktatorem. Przepływ powietrza pomiędzy laktatorem a muszlą, niewymagającą używania rąk, wytwarza oddziałujące na piersi podciśnienie umożliwiające odciąganie pokarmu. Mleko jest następnie gromadzone w pojemniku, a po zakończeniu odciągania może zostać przelane z pojemnika do butelki lub do woreczka przeznaczanego do przechowywania pokarmu. Muszla zbierająca Hands-free Collection Cup nie jest przeznaczona do przechowywania mleka.

Jak podłączyć muszlę do laktatora Solo™ Hands-free?

Muszla zbierająca Hands-free Collection Cup jest połączona z laktatorem Solo™ za pomocą rurki.

Czy trzeba przyjąć pozycję siedzącą, czy można wykonywać inne czynności?

Zestaw Solo™ Hands-free doskonale sprawdzi się podczas relaksu, gdy będziesz potrzebowała chwili wytchnienia, a także gdy będziesz w ruchu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się korzystać z laktatora niewymagającego używania rąk siedząc, spacerując czy opiekując się dzieckiem, Solo™ Hands-free zapewni Ci swobodę wyboru. Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku wszystkich innych laktatorów, muszla zbierająca nie jest przeznaczona do stosowania przy całkowitym pochyleniu ciała lub podczas ćwiczeń, ponieważ w górnej części muszli znajduje się otwór (dzióbek), przez który pokarm może wypływać.

Czy potrzebuję specjalnego biustonosza, aby móc stosować Solo™ Hands-free?

Podczas stosowania Solo™ Hands-free nie ma potrzeby noszenia specjalnego biustonosza. Przenośne muszle zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do większości biustonoszy przeznaczonych do karmienia.

Ile pokarmu mieści muszla laktatora przenośnego?

Muszla zbierająca Hands-free Collection Cup mieści do 150 ml mleka matki.

Ile ważą muszle zbierające pokarm Hands-free Collection Cup?

Jest to jedna z najlżejszych dostępnych muszli, której ciężar wynosi zaledwie 76 g, dzięki czemu nie obciąża użytkowniczki.

W jaki sposób przenośna muszla przylega do piersi?

Muszla zbierająca Hands-free Collection Cup umieszczana jest na piersi wewnątrz biustonosza do karmienia. Dopasowanie biustonosza i podciśnienia wytwarzanego przez laktator zapewnia szczelne przyleganie muszli do piersi podczas odciągania i gromadzenia mleka.

Czy korzystanie z laktatora Solo™ Hands-free wymaga połączenia WiFi?

Nie, do korzystania z laktatora Solo™ Hands-free nie jest potrzebna sieć WiFi. Laktator może łączyć się z Medela Family™ za pośrednictwem technologii Bluetooth®.

Aplikacja Medela Family™ to osobisty asystent, który zapewnia automatyczne śledzenie w czasie rzeczywistym, spersonalizowane, oparte na wiedzy naukowej treści i wskazówki dotyczące odciągania pokarmu, wirtualny system inwentaryzacji mleka, wiele wbudowanych narzędzi i interaktywne listy kontrolne.

Na jak długo wystarcza bateria i czy potrzebna jest oryginalna ładowarka?

Dzięki wbudowanemu w Solo™ Hands-free akumulatorowi z możliwością ładowania przez USB, jeden akumulator umożliwi Ci odciąganie pokarmu nawet przez 1,5 godziny, czyli średnio do 6 sesji odciągania.

Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i kabla dołączonego do laktatora Solo™.

Czy mogę przekształcić pojedynczy laktator Solo™ Hands-free w laktator podwójny?

Nie. Nie jest możliwe przekształcenie laktatora Solo™ Hands-free w laktator podwójny. W przeciwnym razie może to znacząco zmniejszyć podciśnienie, co może wpłynąć na ilość odciąganego mleka podczas sesji odciągania.

Czy mój laktator Solo™ Hands-free współpracuje również z klasycznym zestawem do odciągania pokarmu z butelką?

Laktator Solo™ jest także kompatybilny z zestawem Medela PersonalFit Flex™ (z butelkami). Laktator ten można stosować wraz z muszlą zbierającą dołączoną do zestawu lub z klasycznym zestawem PersonalFit Flex™, który można zakupić oddzielnie.

Skąd mam wiedzieć, jak długo powinienam odciągać pokarm podczas korzystania z laktatora Solo™ i muszli zbierającej Hands-free Collection Cup? Co mogę zrobić, aby skutecznie opróżnić piersi podczas odciągania pokarmu?

Wiele matek nie odczuwa wypływu pokarmu, dlatego podczas odciągania należy zwracać na tę kwestię szczególną uwagę. Rozpoznasz go, gdy zaobserwujesz strumienie mleka wytryskujące do muszli zbierającej.

Jeśli stosujesz laktator wykorzystujący technologię 2-Phase Expression™, będzie on posiadał tryb stymulacji i tryb odciągania. Tryb stymulacji zazwyczaj trwa około minuty, lecz w momencie, w którym zaobserwujesz opisany powyżej wypływ mleka, powinnaś od razu przełączyć urządzenie w tryb odciągania. Pierwszy wypływ zazwyczaj dostarcza około 36% całkowitej ilości mleka, dlatego warto wykorzystać intensywny przepływ, aby zgromadzić więcej pokarmu.

W fazie odciągania stosuj maksymalne komfortowe podciśnienie, czyli najwyższe ustawienie laktatora, które nie powoduje u Ciebie dyskomfortu. Badania wykazały, że pozwala to odciągać podobne ilości mleka, jakie pobiera dziecko podczas karmienia piersią.^{7,8}

Aby odpowiednio dostosować poziom podciśnienia, stopniowo zwiększaj siłę ssania do momentu, gdy poczujesz lekki dyskomfort, a następnie nieco ją obniż. Odciąganie pokarmu nie powinno być bolesne.

Odciąganie powinno być kontynuowane nie przez określony czas, ale do pojawienia się uczucia opróżnionej i miękkiej piersi oraz ustania wypływu. Po rozwinięciu laktacji (czyli po czterech tygodniach) będziesz w stanie przewidzieć, ile minut potrzebujesz na odciąganie, co pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas. Zaleca się sprawdzenie, czy mleko przestało płynąć i jak czujesz swoje piersi, aby móc określić, czy sesja odciągania dobiegła końca. Niektóre mamy potrzebują więcej czasu niż inne ze względu na liczbę wypływów, od której zależy częstotliwość i trwanie przepływu mleka.^{9,10} Niesamowite jest to, że chociaż każda mama posiada własny, unikalny wzorec wypływu pokarmu, Twój będzie zawsze taki sam, niezależnie od tego, czy odciążasz pokarm, czy karmisz piersią.¹¹

Warto zwrócić uwagę na to, że użytkowniczka może łatwo zapomnieć, jak długo korzystała z przenośnego laktatora umieszczonego w staniku, jeśli jednocześnie wykonuje wiele czynności. Zaleca się, aby nie stymulować nadmiernie piersi i nie przedłużać niepotrzebnie korzystania z muszli zbierających i laktatora.

Czy urządzenie oferuje kontrolę ssania podczas stymulacji i odciągania?

Dzięki 9 regulowanym ustawieniom podciśnienia dostępnym w laktatorze Solo™ Hands-free masz pełną kontrolę zarówno nad

trybem stymulacji, jak i odciągania, aby znaleźć poziom podciśnienia, który zapewni Ci maksymalny komfort.

Muszla laktatora przenośnego dostosowuje się do różnych kształtów piersi?

Muszla zbierająca Hands-free Collection Cup posiada anatomiczny kształt, dzięki czemu wygodnie dopasowuje się do większości piersi.

W jakich rozmiarach dostępne są muszle zbierające Hands-free Collection Cup?

Muszle zbierające Hands-free Collection Cup oferują trzy wielkości tuneli: 21 mm, 24 mm i 27 mm, aby zmaksymalizować komfort i skuteczność odprowadzania mleka podczas odciągania. Aby właściwie dopasować muszle zbierające laktatora przenośnego, zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym przewodnikiem po rozmiarach lejeków Medela <https://www.medela.com/fittingguide>. W skład zestawu Solo™ Hands-free wchodzi lejek o średnicy 24 mm. Inne rozmiary można nabyć oddzielnie.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar lejka?

Dobierz lejek, mierząc średnicę brodawki sutkowej. Wybierz lejek, który będzie nieco większy od Twojej brodawki sutkowej.

Rozmiar 21 mm jest odpowiedni dla brodawek sutkowych o średnicy mniejszej lub nieprzekraczającej 17 mm. Rozmiar 24 mm przeznaczony jest dla brodawek sutkowych o średnicy od 17 mm do 20 mm.

Rozmiar 27 mm przeznaczony jest dla brodawek sutkowych o średnicy przekraczającej 20 mm.