

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/megan-laktator-muszlowy-elektryczny-bez-uzycia-rak-babyono-1001-p-58541.html>



Megan Laktator muszlowy elektryczny bez użycia rąk BabyOno 1001

Cena	177,99 zł
Cena poprzednia	196,00 zł
Kod EAN	5901435414453
Producent	Babyono

Opis produktu

Megan Laktator muszlowy elektryczny bez użycia rąk Babyono 1001

Trójfazowy, bezprzewodowy, wygodny. Poznaj mocny i skuteczny laktator MEGAN - Twój nowy partner w karmieniu!

PARTNER W KARMIENIU PIERSIĄ

Potrzebujesz rozkręcić laktację? A może wręcz przeciwnie, masz nadmiar pokarmu i chcesz go przechować na później? Laktator Megan będzie idealnym przyjacielem każdej karmiącej mamy.

MOCNY

Laktator Megan jest jednym z mocniejszych laktatorów dostępnych na rynku. Dzięki 9 stopniowej regulacji siły ssania dostosujesz moc urządzenia do wrażliwości swoich brodawek.

BEZ UŻYCIA RĄK

Innowacyjny design laktatora pozwoli Ci na jednoczesne odciąganie pokarmu i wykonywanie innych czynności w tym samym czasie. To wyjątkowe i praktyczne urządzenie – odciąga pokarm bez użycia rąk.

DYSKRETNY

Laktator Megan jest wyjątkowo dyskretny. Dzięki jego konstrukcji z łatwością schowasz go pod ubraniem, co pozwoli Ci odciągać pokarm w każdych warunkach.

3 ROZMIARY LEJKA

W laktatorze Megan do wyboru masz trzy rozmiary lejków. Wybierz ten, który idealnie dopasuje się do Twojej brodawki, zapewniając Ci maksymalny komfort i wygodę.

SZABLON

Nie wiesz, jaki rozmiar lejka zastosować? Przychodzimy z pomocą. Umieść swoją brodawkę w otworze szablonu i zdecyduj się na rozmiar lejka, który jest najbardziej zbliżony do Twojej brodawki.

PROSTY W BUDOWIE

Nasz laktator bezprzewodowy składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu szybko i bezproblemowo rozłożysz i wyczyścisz urządzenie.

SZCZOTKA DO BUTELKI

By ułatwić czyszczenie do zestawu dołączyliśmy praktyczną szczotkę do butelki.

TRYBY PRACY

- Tryb odciąganie - w tym trybie siłę ssania ustawisz w zakresie od 1 do 9. Poszczególne poziomy różnią się od siebie siłą ssania – od niskiej do wysokiej.
- Tryb 2 w 1 - pobudzenie i masaż cykl złożony z 8 ruchów masujących, po których następuje 1 ruch ssący. Tryb ten zalecany jest do kojenia bólu przepełnionych piersi i pobudzeniem ich w celu odciągania większej ilości pokarmu w krótszym czasie.
- Tryb podwójnej częstotliwości - tryb łączący zalety naprzemiennego ssania tj. z dużą i małą siłą. Cykl ssania o zmiennej sile (słabo - przerwa - mocno) skutecznie pomaga w pobudzaniu wklęsłych brodawek.

3 wymienne lejki

Czy wiesz, że to nie wielkość piersi, a rozmiar brodawki decyduje o tym, czy laktator będzie dobrze dobrany? Wybierając laktator MEGAN masz niemal 100% pewność, że będzie on dla Ciebie idealny. Dlaczego? Zestaw wyposażyliśmy aż w 3 rozmiary lejka: podstawowy - 26 mm (wbudowany w laktator) i 2 wymienne wkładki - lejki w rozmiarach 21 mm i 24 mm. Dzięki temu dobierzesz odpowiedni rozmiar lejka do Twojej brodawki.

Jak dopasować odpowiedni lejek?

- Zmierz w milimetrach średnicę brodawki sutkowej u jej podstawy, nie uwzględniaj otoczki.
- Jeśli średnica Twojej brodawki wynosi 17/18 mm wybierz lejek w rozmiarze najmniejszym - 21 mm.
- Przy brodawce 19 -21 mm, lejek w rozmiarze 24 mm będzie idealną opcją.
- Dla większej brodawki - 22-24 mm mm odpowiedni będzie lejek wbudowany w laktator.

W zestawie znajdziesz również szablon, który ułatwi Ci pomiary i pomoże wybrać odpowiedni lejek.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia- wyrzucić. Używaj elektryczny laktator zgodnie z instrukcją lekarza gdy użytkownik ma zapalenie sutka, odwrócony lub płaski sutek. Laktator jest produktem osobistym. Używanie przyrządu przez więcej niż jedną osobę może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Używaj laktatora elektrycznego w miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie używaj laktatora elektrycznego podczas snu lub nadmiernej senności. Nie używaj laktatora elektrycznego, jeżeli jest on mechanicznie uszkodzony. Nie używaj laktatora elektrycznego z komponentami innych marek, aby uniknąć złego oddziaływania na rezultat odciągania mleka. Nie pozostawiaj laktatora elektrycznego bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania. Nie sięgaj po laktator elektryczny, jeżeli wpadł do wody. Natychmiast odłącz go od zasilania. Nie wystawiaj laktatora elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

- Pojemność 130 ml
- Pojemność baterii 1100 mAh
- Czas pracy na pełni naładowanej baterii: około 120 min.

W zestawie:

- laktator MEGAN
- silikonowy lejek o średnicy 26mm oraz wymienne lejki 24 mm i 21 mm
- przewód do ładowania USB-C
- woreczek do przechowywania
- instrukcja
- Szablon do mierzenia wielkości brodawki
- Specjalna szczoteczka do czyszczenia butelki
- Tritanowa butelka z pokrywką
- Przedłużka do biustonosza