

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/pas-medyczny-rozgrzewajacy-pestki-wisni-akuku-a0637-p-52652.html>



Pas medyczny rozgrzewający - pestki wiśni Akuku A0637

Cena	111,30 zł
Numer katalogowy	Termofor z pestkami wiśni
Kod EAN	5903858996677
Producent	akuku

Opis produktu

Medyczny pas rozgrzewający z pestkami wiśni.

Medyczny Pas Akuku wykonany jest z odpowiednio dobranych i osuszonych pestek wiśni, które pochodzą z Polski.

Tkaniny użyte do produkcji spełniają standardy OEKO-TEX 100.

Produkt jest naturalny, ekologiczny, biodegradowalny i bezpieczny dla alergików.

Produkt ten nie posiada płynów, które mogą się rozlać. Po podgrzaniu utrzymują swoją temperaturę przed dłuższy czas..

Naturalnie oddaje ciepło, co eliminuje możliwość poparzenia i uszkodzenia skóry.

Pas składa się z 4 oddzielnych komór, w każdej z nich znajduje się wyciągany woreczek z pestkami o wadze 250g.

Pas / pokrowiec jest wykonany ze 100 % bawełny, można prać w temp. 40 stopni co pozwala utrzymać go w czystości.

Zastosowanie termoformu na gorąco:

- rwa kulszowa
- bóle mięśni
- bóle menstruacyjne
- bóle lędźwiowe
- rozluźnia napięcia mięśniowe karku oraz ramion
- bóle reumatyczne

Zastosowanie termoformu na zimno:

- gorączka
- stłuczenia
- migrena

Sposób użycia:

- grzanie:

Termoform należy umieścić w kuchenke mikrofalowej (850 W / około 2 minuty), piekarniku (130 ° / około 10 min.) MOŻLIWOŚĆ GRZANIA W POKROWCU. Ostrzeżenie! – Nie stosuj rozgrzanego pasa w przypadku chorób serca, żyl, czy ostrych stanów zapalnych.

Po nagrzaniu się termoformu wymieszaj pestki i sprawdź temperaturę na nadgarstku.

- na zimno:

Włożyć termoform do zamrażalnika na około 60 min. lub do lodówki na około 2 godziny.

Pamiętaj, aby zabezpieczyć go przed kontaktem z żywnością.

Produkt nie jest zabawką – zawiera małe elementy, które dziecko może połknąć.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymień go na nowy.

Rozmiar: 152 x 20 cm

NIGDY NIE PIERZ WKŁADU Z PESTKAMI.