

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/pinemed-pieluszka-dziecieca-z-woreczkiem-do-pobierania-moczu-powyzej-11-kg-1-sztuka-p-60389.html>



PINEMED pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu, powyżej 11 kg, 1 sztuka

Cena	24,99 zł
Numer katalogowy	Pieluszki jednorazowe
Kod EAN	8699096966721
Producent	Tradix Group

Opis produktu

PINEMED pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu, powyżej 11 kg, 1 sztuka

Pinemed to prostszy sposób na pobranie moczu u dziecka. Jest to pierwsza i unikalna na świecie pieluszka, która umożliwia pobranie próbki moczu do badań od dzieci i niemowląt w komfortowy i nieinwazyjny sposób bez ryzyka kontaminacji próbki.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.


Pinemed to prostszy sposób na pobranie moczu u dziecka. Jest to pierwsza i unikalna na świecie pieluszka, która umożliwia pobranie próbki moczu do badań od dzieci i niemowląt w komfortowy i nieinwazyjny sposób bez ryzyka kontaminacji próbki.

Ryzyko kontaminacji próbki pobranej przez Pinemed wynosi jedynie 3,57%, czyli nawet o 7-60% mniejsze niż przy obecnie stosowanych metodach nieinwazyjnych*.

*Badanie przeprowadzone w okresie kwiecień – październik 2022 na grupie 102 dzieci (70 dziewczynek, 32 chłopców). Wyniki pozytywne badań próbek moczu zostały potwierdzone poprzez cewnikowanie. Zgodność na poziomie 96,43% pod względem gatunkowym oraz liczby jednostek koloniotwórczych.

Sposób użycia:

1. Umyj ręce przed użyciem wyrobu.
2. Umyj okolice narządów płciowych dziecka przed użyciem wyrobu.
3. Wyciągnij pieluszkę Pinemed z opakowania.
4. Wyprostuj woreczek na mocz połączony z pieluszką ciągnąc go w dół.
5. Załóż dziecku pieluszkę tak jak zawsze.
6. **WAŻNE!** Rekomenduje się nie zakładać dolnej części ubrania podczas noszenia pieluszki Pinemed. Wyrób przeznaczony jest do używania u dzieci chodzących lub raczkujących. Nie używaj produktu, gdy dziecko znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej. U dzieci, które jeszcze nie raczkują czy nie stoją, wyrób może być stosowany podczas trzymania dziecka na rękach.
7. Po pobraniu moczu delikatnie oddziel woreczek na mocz lub odetnij od pieluszki i przelej zawartość do pojemnika na mocz.
8. Zabierz próbkę moczu do laboratorium w ciągu 90 min, zgodnie z zaleceniem twojego lekarza.

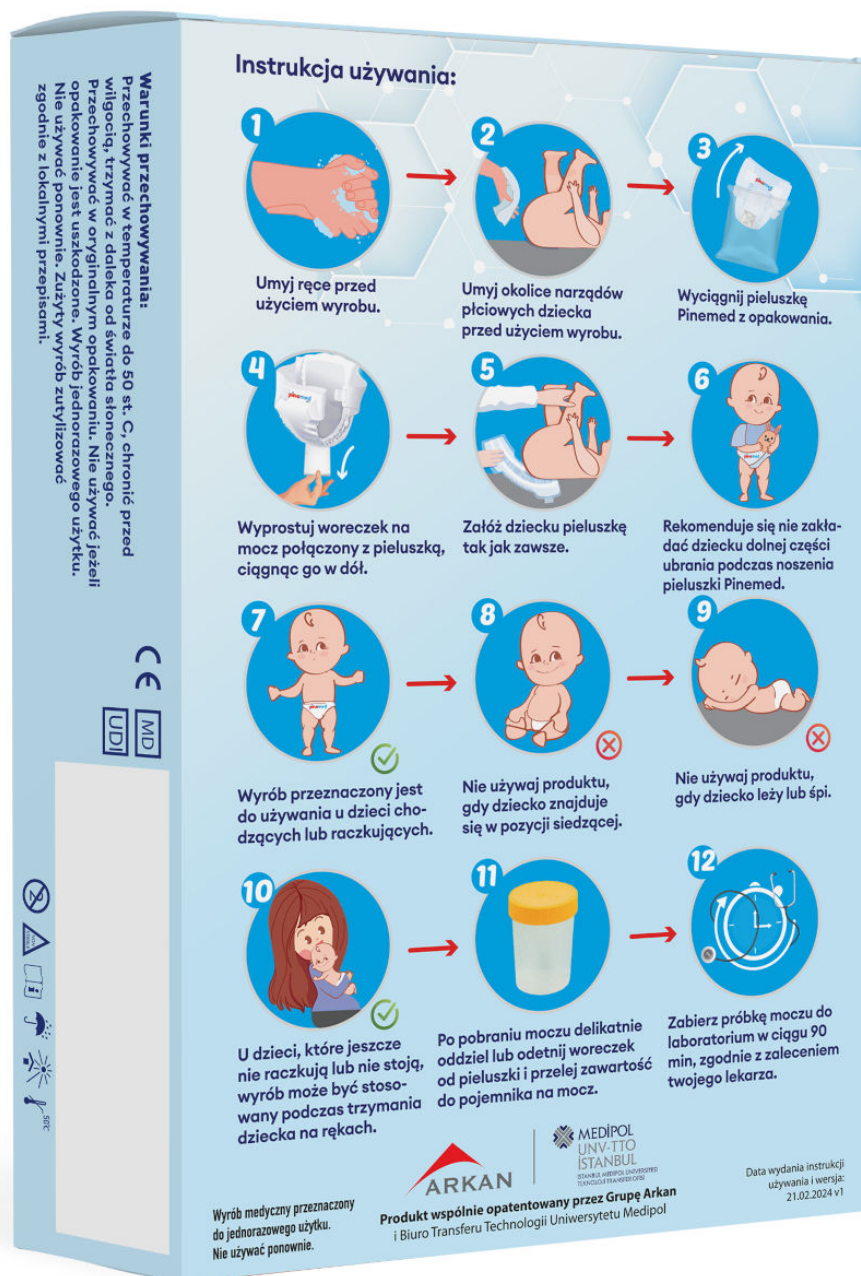

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze do 50 st. C, chronić przed wilgocią, trzymać z daleka od światła słonecznego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Zużyty wyrób zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Producent:

Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş.
Velimeşe Mah. Hacı Şeremet Cad. No: 14
Ergene Tekirdağ

Dystrybutor:

Tradix Group Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa