

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/poporodowa-butelecza-do-podmywania-peri-350-ml-akuku-a0684-p-58294.html>



Poporodowa buteleczka do podmywania PERI 350 ml Akuku A0684

Cena	13,71 zł
Cena poprzednia	15,49 zł
Kod EAN	5907644006847
Producent	akuku

Opis produktu

Butelka poporodowa do podmywania - komfort i higiena.

Nasza butelka poporodowa to must-have. Butelka do podmywania z delikatnym, orzeźwiającym i rewitalizującym strumieniem wody ułatwia pielęgnację krocza podczas korzystania z toalety, dzięki czemu zmniejsza ryzyko ewentualnych infekcji czy dodatkowych podrażnień. Butelka świetnie sprawdza się jako dodatkowe wsparcie w utrzymaniu codziennej higieny, w ciąży i po porodzie, podczas miesiączki, wyjazdów czy infekcji. Niezastąpiona w czasie dłuższej podróży ze względu na niewielki rozmiar. Butelkę i jej części myj w ciepłej wodzie z mydłem, okresowo polewaj wrzątkiem.

Bezpieczna i delikatna higiena

Stworzona z myślą o wrażliwości skóry po porodzie, nasza butelka poporodowa gwarantuje delikatne oczyszczanie bez podrażnień. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej końcówce, strumień wody jest idealnie dopasowany do potrzeb Twojego ciała, zapewniając uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień.

Łatwość użycia

Ergonomiczny kształt butelki sprawia, że jest wyjątkowo wygodna w użyciu, niezależnie od tego, czy jesteś w szpitalu, czy w domu. Intuicyjna obsługa pozwala na precyzyjne podmywanie, dając poczucie pełnej kontroli nad codzienną higieną.

Bezpieczne materiały

Butelka wykonana z wysokiej jakości materiałów, które są w pełni bezpieczne i przyjazne skórze. Idealna do użytku w pierwszych dniach po porodzie, nie zawiera szkodliwych substancji, co czyni ją niezastąpionym elementem poporodowej pielęgnacji.

Komfort i odnowa

Dzięki takiemu rozwiązaniu, butelka poporodowa staje się Twoim niezastąpionym towarzyszem w czasie regeneracji. Zapewnia szybkie uczucie ulgi, pozwalając Ci skupić się na sobie i swoim maluszk.

Instrukcja użycia

- Będąc w toalecie, wlej do butelki ciepłą wodę i mocno zakręć nakrętkę. Butelka posiada 2 końcówki z różnym kątem strumienia dla wygodnego użytkowania.
- Odwróć butelkę do góry nogami, skieruj ją między nogi, trzymając dyszę skierowaną w stronę krocza i delikatnie ściśnij butelkę.
- Możesz używać butelki podczas korzystania z toalety, dzięki czemu nie będziesz czuła szczypania i pieczenia lub tylko w celu oczyszczenia okolic intymnych.
- Po użyciu odkręć, wypłucz i osusz butelkę.

Ostrzeżenia

Butelka nie jest wodoszczelna – jej zawartość może wylać się podczas transportu. Zanim wrzucisz ją do torby, opróżnij ją, wysusz i schowaj do woreczka dołączonego do produktu. Butelka nie służy do irygacji. Przemywamy tylko zewnętrzne partie miejsc intymnych. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.