

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sopelek-aspirator-do-nosa-3-koncowki-jednorazowe-p-34032.html>



SOPELEK aspirator do nosa + 3 końcówki jednorazowe

Cena	18,99 zł
Cena poprzednia	23,80 zł

Opis produktu

Aspirator do nosa Sopelek umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska Sospelkiem pozwala zapobiec lub ograniczyć infekcje w: górnych drogach oddechowych (zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz dolnych drogach oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc). Aspirator jest łatwy w obsłudze.

Wskazania: dla dzieci i niemowląt do bezpiecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa w przeziębieniach, zapaleniu zatok i schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny.

Sposób użycia: nałóż końcówkę aspirator z jednorazowym filtrem absorbującym na cylinder główny aspiratora. Umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym w prawym lub lewym otworze nosowym małego dziecka. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik. Powtórz czynności w drugim otworze nosa małego dziecka. Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym i wyrzuć ją (opcjonalnie dopuszcza się wyparzenie zanieczyszczonej końcówki z zastrzeżeniem wymiany jednorazowego filtra absorbującego na nowy). Jeżeli oddychanie małego dziecka wydaje się bardzo utrudnione, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub roztwór soli morskiej do stosowania do nosowego.

Elementy zestawu:

- aspirator,
- 3 jednorazowe końcówki
- praktyczne plastikowe etui.

Aspirator dla dzieci Sopelek posiada pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Wyroby medyczne Sopelek nie mogą być używane w przypadku uczulenia niemowlęcia na jakikolwiek składnik wyrobu, a także w przypadku przeciwwskazań lekarza.

Producent:

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9,
Katowice