

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/termofoz-z-pestek-wisni-dla-dzieci-na-bol-i-kolke-13x16-cm-akuku-a0635-p-47929.html>



Termofoz z pestek wiśni dla dzieci na ból i kolkę 13x16 cm Akuku A0635

Cena	24,60 zł
Cena poprzednia	25,60 zł
Kod EAN	5903858996653
Producent	akuku

Opis produktu

Termofoz z pestkami wiśni.

Termofoz wykonany jest z odpowiednio dobranych i osuszonych pestek wiśni.

Jest w 100% bezpieczny i przyjazny dla dziecka.

Produkt ten nie posiada płynów które mogą się rozlać. Po podgrzaniu utrzymuje temperaturę do 1 godziny. Naturalnie oddaje ciepło co eliminuje możliwość poparzenia i uszkodzenia skóry.

Kształt idealnie nadaje się na małe brzuszki,

Zastosowanie termofozu na gorąco:

- kolki noworodkowe, wzdęcia
- rwa kulszowa
- bóle mięśni
- bóle menstruacyjne

Zastosowanie termofozu na zimno:

- ugryzienia owadów
- gorączka
- siniaki, guzy,
- migrena

Sposób użycia: - Grzanie :

Termofoz umieścić w kuchence mikrofalowej (600 W / około 90 sekund), piekarniku (130 °/ około 10 min.) lub na innym źródle ciepła np. grzejnik. NIGDY NIE GRZEJ WKŁADU Z POKROWCEM. UWAGA - nie stosuj rozgrzanego termofozu na choroby serca, żył, ostrych stanów zapalnych.

Po nagraniu się termofozu wymieszaj pestki i sprawdź temperaturę na nadgarstku. - Na zimno :

Włożyć termofoz z pokrowcem do zamrażalnika na około 60 min lub do lodówki na około 2 godziny.

Pamiętaj aby zabezpieczyć go przed kontaktem z żywnością.

Pokrowiec można prać ręcznie, lub w pralce w temp 30° NIGDY NIE PIERZ WKŁADU Z PESTKAMI.

Produkt nie jest zabawka - zawiera małe elementy które dziecko może połknąć.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymień go na nowy